

## INTRODUCTION


Depuis le quatrième trimestre 2016, apDia distribue les produits et les instruments de **Grifols** dans le Bénélux.

**Grifols** est un producteur important d'instruments pour les soins médicaux spécialisés par des prestataires de soins professionnels. Le département de diagnostic de l'entreprise fournit dans le monde entier des tests de laboratoire et des outils pour l'analyse clinique aux hôpitaux et aux banques du sang. Ce département produit des appareils d'analyse, des réactifs et des instruments proposant des résultats de tests précis et fiables pour des spécialistes notamment dans le domaine de l'**immunohématologie**.

## MD MULTICARD

La **MDmulticard** est une carte innovante, basée sur le principe de la technologie de flux latéral, pour la détermination du **groupe ABO, du Rh(D), du Rh et du phénotype K en 5 minutes avec une seule goutte de sang**.

La carte a été spécialement développée pour simplifier les méthodes standard et augmenter le workflow dans des situations extrêmes, afin d'aider les patients plus rapidement. La procédure est très simple et exige peu de manipulations. Elle peut, en outre, être réalisée n'importe où étant donné qu'aucun appareil ou aucune expertise complète en immunohématologie n'est nécessaire. La **MDmulticard** est idéale à utiliser dans des **situations d'urgence mortellement graves**, où les patients exigent une attention immédiate.

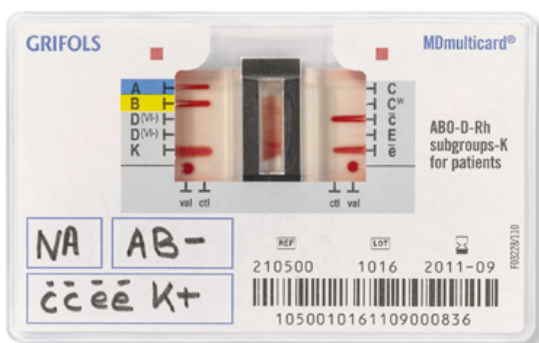

Source : <https://www.grifols.com/en/web/mexico/diagnostics/-/product/mdmulticard#>

Les résultats de la **MDmulticard** sont très **fiables** et **précis**. La sensibilité et la spécificité sont comparables à

celles de la technologie de l'agglutination en colonnes. Compte tenu de l'intervention limitée de l'utilisateur, le risque d'erreurs pendant l'exécution ou l'interprétation est fortement limité.

Avec la **MDmulticard**, un résultat **stable** est obtenu après seulement 5 minutes et peut encore être réexaminé dans les 72 heures.

## CONTRÔLES DE QUALITÉ IH

La gestion des contrôles de qualité sur des réactifs de groupes sanguins est essentielle pour pouvoir garantir une transfusion sûre chez les patients.

Grifols a développé de nouveaux **contrôles de qualité internes (IQC)** concernant les réactifs en immunohématologie pour la typologie de groupe sanguin ABO, pour la détermination du Rh(D), du Rh et des phénotypes K et pour le dépistage d'anticorps irréguliers. Ces contrôles, qui simulent de véritables échantillons de patients, se composent de tubes remplis d'une solution comparable au sang complet (15% ± 2% hématocrite). Ils peuvent être utilisés pour vérifier et suivre le fonctionnement correct des réactifs Grifols dans des systèmes DG Gel manuels ou automatisés, dans le système MDmulticard et dans des techniques conventionnelles.

Selon les procédures pour l'assurance qualité dans votre laboratoire, vous avez le choix entre 2 contrôles différents :

- **Extended IV Control :**  
contrôle complet composé d'un ensemble de 4 tubes



- **Essential II Control :**  
contrôle de base composé de 2 tubes en double exemplaire



Vous trouverez au verso de cette lettre d'information un formulaire de réponse vous permettant de demander des informations supplémentaires sur les produits présentés ici.

---

CIVILITÉ : M/MME/DR

NOM : \_\_\_\_\_

PRÉNOM : \_\_\_\_\_

ENTREPRISE OU INSTITUT : \_\_\_\_\_

RUE : \_\_\_\_\_

N° : \_\_\_\_\_ BOÎTE : \_\_\_\_\_

CODE POSTAL : \_\_\_\_\_

VILLE : \_\_\_\_\_

N° DE TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_

ADRESSE E-MAIL : \_\_\_\_\_

---

Je souhaite recevoir des informations supplémentaires concernant les sujets suivants :

- MD MULTICARD
- CONTRÔLES DE QUALITÉ IH
- AUTRES : .....

Représentant pour la Belgique : Jürgen Naudts

Représentants pour les Pays-Bas : Marian Pelkmans & James Kessels

Renvoyez-nous ce formulaire de réponse par fax au +32 (0)14 81 29 45, par e-mail à [admin@apdia.be](mailto:admin@apdia.be) ou par courrier postal à apDia, Raadsherenstraat 3, B-2300 Turnhout, Belgique.